

## Návod k použití DA-5301 (Měkký navlékač ponožek)

**Přečtěte si a uchovejte tento návod, poskytuje základní informace pro správné a bezpečné použití. Tento návod je pouze vodítkem.**

### ÚVOD

Měkký navlékač ponožek pomáhá kompenzovat zdravotní postižení tím, že pomáhá člověku s oblékáním ponožek nebo podkolenek, aniž by se musel ohnout v pase nebo v bocích. Vnější froté díl drží ponožky a podkolenky bezpečně na místě. Lze jej ohnout, aby se navlékač vešel do jakékoliv velikosti ponožek nebo podkolenek.


### SPECIFIKACE

Délka žlábků	Délka popruhu	Hmotnost	Materiál
230 mm	850 mm	88 g	PP (žlábků) / Nylonová tkanina / Froté tkanina / Bavlna (popruhy)

### NÁVOD K POUŽITÍ

1. Dejte k sobě oba boční okraje navlékače ponožek.
2. Natahujte ponožky/podkolenky na navlékač ponožek, dokud nebudou zcela na pomůcce. Ujistěte se, že je navlékač pevně umístěn ve špičce ponožky/podkolenky a ponožka/podkolenka nepřesahuje přes okraj, kde jsou připojeny popruhy. (Obrázek 1)
3. Držte popruhy a spusťte navlékač na podlahu před nohou. Ujistěte se, že vyklenutá strana směřuje vzhůru.
4. Vložte nohu do navlékače ponožek. (Obrázek 2)
5. Tahejte za popruh, dokud se navlékač neuvolní z ponožky.

Obrázek 1

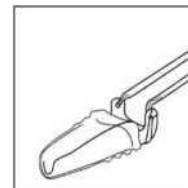

Obrázek 2



### VAROVÁNÍ

- Navlékač ponožek neperte v pračce.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení a poškození.

### ÚDRŽBA

Navlékač ponožek lze čistit pouze ručním praním.

Navlékač ponožek neperte v pračce.

